

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### ISOMAR dekongestivni sprej sa hijaluronskom kiselinom

**ISOMAR dekongestivni sprej sa hijaluronskom kiselinom** sadrži hipertonični rastvor morske vode iz Cinque Terre (Ligurija, Italija).

**ISOMAR dekongestivni sprej sa hijaluronskom kiselinom** ima dvostruko dejstvo korisno za disajne puteve:

1. **Prečišćena morska voda** je prirodni dekongestiv, razrjeđuje sekret i brzo olakšava začepljenost nosa. Pospješuje drenažu sekreta i čišćenje nosnih šupljina te olakšava disanje.
2. **Hijaluronska kiselina** održava sluzokožu mekanom, štiti ćelije od dehidracije, smanjuje rizik od isušivanja i mikrooštećenja sluzokože nosa, koja se mogu pojaviti kod jakih prehlada, alergijskih rinitisa ili sinusitisa.

### SASTAV

Hipertonična morska voda (prirodna koncentracija soli morske vode iznosi približno 3%), natrijum hijaluronat. Inertni potisni gas: azot. Ne sadrži konzervanse niti boje.

### NAMJENA

**ISOMAR dekongestivni sprej sa hijaluronskom kiselinom** se preporučuje za brzo olakšavanje simptoma začepljenog nosa kod prehlada, bronhitisa, sinusitisa, alergija (uključujući i polensku alergiju). Proizvod je pogodan za primjenu kod odraslih i djece starije od 12 mjeseci. Ne izaziva ovisnost, ne oštećuje sluzokožu nosa, ne postoji mogućnost predoziranja i može se koristiti čak i tokom trudnoće. Hijaluronska kiselina ga čini pogodnim za čestu upotrebu.

### UPUTSTVO ZA PRIMJENU

Nježno unijeti aplikator u nosnicu i raspršiti sprej 2-3 puta u svaku nosnicu, najviše tri puta dnevno. Ostaviti da rastvor djeluje par sekundi i ispuhati nos. Nakon upotrebe **ISOMAR dekongestivnog spreja sa hijaluronskom kiselinom**, skinuti aplikator, oprati vodom i osušiti. Ukoliko ne dođe do poboljšanja, posavjetovati se sa ljekarom. Ne koristiti duže od dvije sedmice. Ne prekoračivati preporučenu dozu. ISOMAR sprej se može koristiti i u vertikalnom i u horizontalnom položaju kako bi ispiranje nosa kod odraslih i djece bilo još lakše i temeljitije.



**VERTIKALNI POLOŽAJ:** upotreba spreja u vertikalnom položaju omogućava bolji doseg svih žlijebova nosne pregrade te kompletno i brže čišćenje.

**HORIZONTALNI POLOŽAJ:** kod djece starije od 12 mjeseci, sprej primijeniti u horizontalnom položaju.

### KONTRAINDIKACIJE

Ne upotrebljavati **ISOMAR dekongestivni sprej sa hijaluronskom kiselinom** kod djece mlađe od 12 mjeseci. Ne upotrebljavati u slučaju krvarenja iz nosa.

### UPOZORENJA

Spremnik je pod pritiskom, može eksplodirati ako se pregrije. Čuvati dalje od izvora toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih zapaljivih izvora. Zabranjeno pušenje. Ne bušiti niti

spaljivati, ni nakon upotrebe. Zaštititi od sunčevih zraka. Ne izlagati temperaturi višoj od 50°C. Ne koristiti istovremeno s drugim proizvodima za lokalnu primjenu. Čuvati van domašaja djece. Proizvod koristiti samo za predviđenu namjenu. Proizvod se može koristiti kod djece starije od 12 mjeseci, a primjenjivati ga mora odrasla osoba. Ako se ne očuva cjelovitost proizvoda, može doći do izmjene funkcionalnih karakteristika. Ne koristiti poslije isteka roka trajanja. Čuvati na temperaturi između 5°C i 25°C. U nekim slučajevima, proizvod može izazvati blagu iritaciju.

#### **PAKOVANJE**

Sprej za nos sa hipertoničnim rastvorom morske vode i hijaluronskom kiselinom, za dekongestiju, 100 ml, u kartonskoj kutiji sa priloženim uputstvom za upotrebu.

#### **ROK TRAJANJA**

3 godine

**Proizvođač:** COSWELL SPA, Via Gobetti 4, 40050 Funo di Argelato, Italija

**Nosilac odobrenja:** Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo, Igmanska 38, 71320 Vogošća

Broj rješenja o upisu u Registar medicinskih sredstava: 06-07.4-1-3793-3/19